

COMPRESSANA FIX

Haftlotion für medizinische Kompressionstrümpfe alkoholfrei

WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - ALS ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN

Zweckbestimmung

COMPRESSANA FIX ist eine wasserlösliche Haftlotion zum Befestigen von Kompressionsprodukten und -textilien auf der Haut.


Inhaltstoffe

- ✓ Aqua (Water)
- ✓ Polyvinylpyrrolidon (PVP)
- ✓ Glycerin

Anwendung

Vor der Anwendung müssen Haut und Strumpf trocken und sauber sein. Alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm und Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden.

Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung entsprechend der Gebrauchsanweisung an. Legen Sie den Rand nach unten um und tragen Sie den Klebstoff mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut, (siehe Abb. A und C) nicht auf den Strumpf. Ein einmaliges Auftragen der Haftlotion rund um den Arm oder das Bein herum ist ausreichend. Klappen Sie anschließend den Strumpfrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an. Bei Strümpfen mit einem Silikonrand sollte die Haftlotion nicht direkt unter diesem aufgetragen werden. Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Haftlotion in zwei Längsstreifen (senkrecht beidseitig) auf die Haut aufgetragen werden (siehe Abb. B und D).

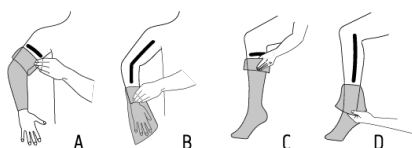

Anwendungsdauer

Die Haftlotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

Reinigungshinweise

Reste der Haftlotion lassen sich mühelos mit Wasser von der Haut und dem Kompressionsprodukt abwaschen. Zusätzliche Reiniger sind nicht erforderlich. Waschen Sie die Kompressionsversorgung nach dem Tragen gemäß den Vorgaben des Kompressionsstrumpf-Herstellers.

COMPRESSANA FIX ist wasserlöslich, enthält weder Farbstoffe noch Parfümstoffe und hinterlässt keine Flecken.

Besondere Hinweise

Zum leichten und schonenden Ausziehen kann der Kompressionsstrumpf an den Klebestellen vorab mit einem nassen Lappen angefeuchtet werden.

Schweiß, andere Flüssigkeiten, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass COMPRESSANA FIX möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Haftlotion ist nicht für die Klebeverbindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

Gegenanzeigen

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf die Inhaltsstoffe

Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotinpflaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes/Öle, etc.). Nicht auf Piercings, tätowierter Haut sowie Infusionsschläuche auftragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rel. 03/2022

Bei Verletzungen oder Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser.

Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden!

Haftlotion nicht in Kontakt mit Schleimhäuten und Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Haftlotion nicht verschlucken. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.

Hinweis zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse: Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Apotheke oder Fachhändler. Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Haftlotion sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden in dem sich der Benutzer befindet. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert.



Gefahrenhinweise / Anwendungseinschränkungen

Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber.



Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.

Bei einer falschen Dosierung/Anwendung von **COMPRESSANA FIX** Haftlotion kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden.

Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflegepersonal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden.

Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt vor der Anwendung, falls Sie Diabetiker sind oder Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.) oder Ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.

Für eine optimale Haftung ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Haftlotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren oder zu enthaaren. **COMPRESSANA FIX** nicht direkt nach der Rasur auftragen, um Hautreizungen und -sensibilisierungen zu vermeiden.

Nach der Anwendung von **COMPRESSANA FIX** Haftlotion muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Klebelotionsrückstände zu entfernen.

Haltbarkeit, Gewährleistung, Transport und Lagerung, Entsorgung

Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Das Produkt stets gut verschlossen halten, stehend lagern und transportieren.



Weitere Hinweise finden sie auch im Sicherheitsdatenblatt unter www.compressana.de. Bei Unfall oder Unwohlsein erhalten Sie 24 h unter der Giftnotrufnummer +49 761 19240 Auskunft.

Wegen Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit der Haftlotion nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden. Das Haltbarkeitsdatum der Haftlotion ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Haftlotion verwenden. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf. Halten Sie die Haftlotion von Kindern und Menschen mit geistigen Einschränkungen fern.

Behälter nur restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.



COMPRESSANA GmbH
Böhmerwaldstr. 3
93073 Neutraubling
Germany
Tel. +49 (0) 9401/9226-0
www.compressana.de



Ultrana GmbH
Mackstraße 112
88348 Bad Saulgau
Germany
Tel. +49 (0) 7581/2007-298
www.ultrana.de

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

COMPRESSANA

FIX
HAFT
LOTION

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rel. 03/2022

REF

Art. 0116
PZN 05704786
UDI-DI (PPN) 110570478638
UFI Nr. 3WCN-AOU4-Q007-D8CR
Hilfsmittel-Nr. 17.06.07.0011



Gebrauchsanweisung beachten
Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender,
die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.

REF

Artikel Nummer, siehe Aufdruck Etikett

Symbolerklärungen

Zeigt den Vertrieb des Medizinprodukts an.



Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an.

MD

MD Medizinprodukt zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Medizinprodukt handelt.



Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Produkt selbst angebracht werden.

LOT

Chargen Nummer, siehe Aufdruck Etikett



Verwendbar bis, siehe Aufdruck Etikett
(Monat. Jahr)



CE-Konformitätskennzeichnung



Für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen

DOC. 220331_Gebrauchsanweisung_COMPRESSANA_FIX
Revision: 03/2022

Ultrana GmbH stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.