

EINZIGARTIG EFFEKTIV • WASSERFEST • LEICHT ANWENDBAR

MIT DRUCK GEGEN NARBEN

**WELT
NEUHEIT**



ScarExpress

NARBEN-KOMPRESSIOSPFLASTER

www.narbenpflege.online

Hautfreundlich und wasserfest

ScarExPress enthält als Kernstück ein innovatives Kompressionselement, eingebettet in ein hautfreundliches und wasserfestes Tape mit starker Klebekraft. Dieses erzeugt bei richtiger Anwendung direkt auf der Narbe einen dauerhaften Druck, welcher dafür sorgt, dass sich die Narbe bereits nach wenigen Wochen deutlich positiv verändert.

ScarExPress enthält keine kosmetischen oder pharmazeutischen Wirk- bzw. Inhaltsstoffe und ist zur dauerhaften Anwendung geeignet.



Effektive Narbenbehandlung mit dauerhaftem Druck


Die Kompressionstherapie gehört zu den effektivsten und empfohlenen Behandlungsmethoden in der Narbentherapie. Denn kontinuierlicher Druck verhindert ungeordneten und übermäßigen Bindegewebsumbau und hemmt somit die Entstehung wuchernder und erhabener Narben (hypertrophe Narben, Keloide). Das Narbengewebe wird so weicher und geschmeidiger, die Dicke und Rötung der Narbe wird reduziert.

ScarExPress ist das erste Narbepflaster mit Kompression – ideal geeignet für Prävention, Korrektur und Reduzierung von neuen und bereits bestehenden Narben. Es enthält als Kernstück ein innovatives Kompressionselement, eingebettet in ein hautfreundliches und wasserfestes Tape mit starker Klebekraft.

Dieses erzeugt bei richtiger Anwendung einen dauerhaften therapeutischen Druck, welcher dafür sorgt, dass die Narbe sich bereits nach wenigen Wochen positiv verändert. ScarExPress verhindert die Überdehnung der Narbe und beugt der Gefahr der Neubildung von Narbenzellen vor. Zusätzlich wird die Narbe vor Fremdeinwirkung und UV-Strahlen geschützt und Juckreiz gemindert.

Narbenbildung und Narbenreifung ist ein langfristiger Vorgang. Dies ermöglicht auch eine nachträgliche Einflussnahme und Korrektur. Dauerhafte und optimale ästhetische Ergebnisse benötigen je nach Alter und Zustand der Narbe mehrere Monate. Ein frühzeitiger Beginn und konsequente Anwendung, Tag und Nacht, reduzieren die Therapiezeit.

Behandlungsverlauf unter Kompression:

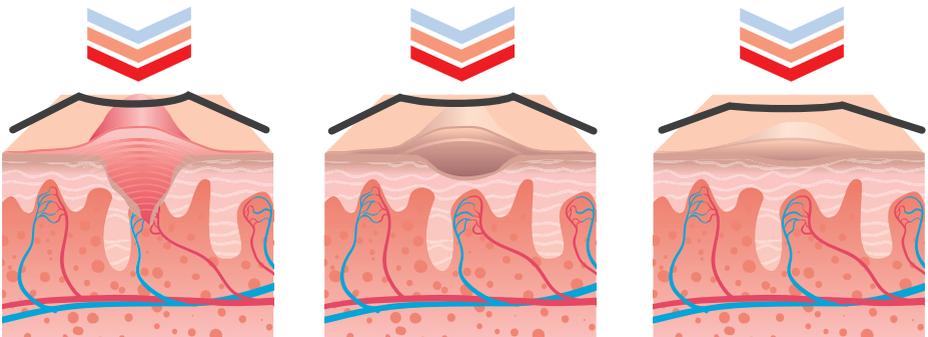

Das Kompressionselement ist flexibel und passt sich dem momentanen Zustand der Narbe an, um so kontinuierlich Druck auszuüben

Behandlung mit ScarExpress

Die Behandlung von Narben mit partiellem Druck z.B. mittels Kompressionsbekleidung und -bandagen ist medizinischer Standard. Narben treten oft an Stellen auf, die mit Kompressionsbekleidung nur schwer und aufwendig zu versorgen sind. ScarExpress ist die Alternative, mit der auch schwer erreichbare Stellen oder kleine Narben einfach und wirkungsvoll behandelt werden können.

Bei regelmäßiger Behandlung über einen längeren Zeitraum (3 – 24 Monate) wird die Narbe geschmeidiger, deutlich flacher, die Rötung nimmt ab und Juckreiz wird ggf. reduziert. Unter optimalen Bedingungen ist die Narbe im austerapierten Zustand nahezu unsichtbar und kaum mehr fühlbar. Dies wurde mit Hilfe von Fallstudien über einen längeren Zeitraum nachgewiesen. Auch ältere Narben können erfolgreich mit ScarExpress behandelt werden.



Durch Entzündungen von Piercings können hässliche Narben entstehen.

Hypertrophe Narben

Hypertrophe Narben zeichnen sich durch ein wulstiges, dunkles bzw. rötlich erhabenes Narbengewebe aus, welches nicht über die Wundgrenzen herauswächst.



Keloide

Sie sind durch wucherndes, rötliches Narbengewebe gekennzeichnet. Bei Keloiden wächst die Narbe auch nach der Wundheilung weiter und dehnt sich über den Verletzungsbereich in umliegende Bereiche aus. Auch nach chirurgischer Entfernung kann die Narbe wieder auftreten, oft schlimmer als vorher.







Einfache Anwendung

Die Anwendung ist nicht schmerzhaft und in der Regel nicht störend. ScarExPress ist über einen langen Zeitraum auf der gleichen Hautpartie anzuwenden.

Verwenden Sie ScarExPress nur auf dafür geeigneten Körperstellen und auf für Kompressionsbehandlung geeigneten Narben. Beachten Sie diesbezüglich die Hinweise in der Gebrauchsanweisung von ScarExPress oder fragen Sie Therapeuten oder medizinisches Fachpersonal.

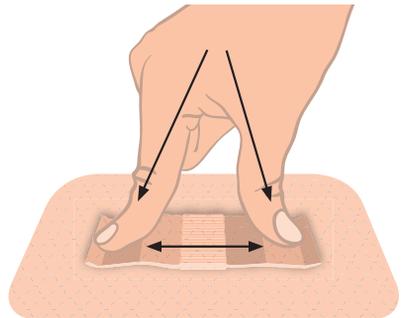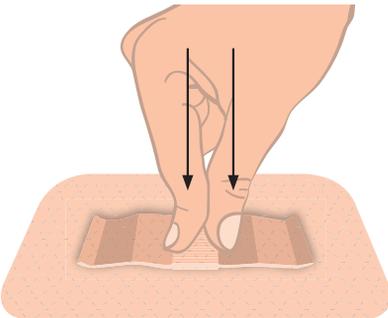

Einfach das Kompressionselement in der Mitte nach unten auf die Narbe drücken, den Druck halten und fest nach außen streichen.




ScarExPress ist effektiv und angenehm. Das atmungsaktive Material passt sich flexibel an den Körper an und ermöglicht eine langfristige Anwendung i. d. R. ohne Hautreizung.

ScarExPress


Narben-Kompressionspflaster ist in drei Größen erhältlich:

UVP:
€ 49,90


S
1,5 x 1 cm

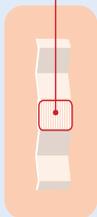

M
3,2 x 1 cm

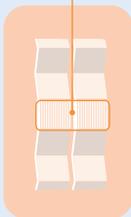

L
5 x 1 cm

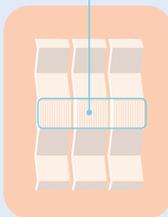

| | S | M | L |
|----------|----------|----------|----------|
| Art. Nr. | 5401 | 5402 | 5403 |
| PZN | 14817383 | 14817408 | 14817414 |
| VE | 4 Stck. | 3 Stck. | 2 Stck. |

Art.-Nr. C168 cc 10/2019

Vertrieb: COMPRESSANA GmbH
Böhmerwaldstraße 3 · 93073 Neutraubling · Germany · Tel.: 09401 9226-0
Fax: 09401 9226-20 · info@compressana.de · www.narbenpflege.online

