

Jetzt mit
Hilfsmittel-
nummer!



Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Individuell anpassbare Kompression für die
Entstauung wurde offiziell in das
GKV-Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen

Lebensfreude in Bewegung

Erfolgreiche Ödemtherapie

Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE)

Die Standardtherapie des Lymphödems ist die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE). Alle Maßnahmen der KPE (Manuelle Lymphdrainage (MLD)), Kompressionstherapie, entstauende Bewegungs- und Atemtherapie, Hautpflege und Hautsanierung sowie die Aufklärung und Schulung zur individuellen Selbsttherapie) sollen aufeinander abgestimmt und in Kombination angewendet werden – denn gemeinsam sichern sie den langfristigen Erfolg in der Ödemtherapie.



Bandagierung:
Bandagehilfen (Juzo SoftCompress),
Medizinische adaptive
Kompressionssysteme (Juzo ACS Light,
Juzo Compression Wrap)

Flachstrickversorgung nach Maß

Nachtversorgung Juzo SleepCompress

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) können in der Therapiephase der Entstauung von Lymphödemen, venösen Ödemen und auch bei Ulcus cruris venosum als effiziente Alternative zu herkömmlichen Kompressionsbinden eingesetzt werden. Sie unterstützen den Therapieerfolg der manuellen Lymphdrainage durch das Selbstmanagement maßgeblich. Die Kompressionssysteme lassen sich individuell anpassen – auch bei sich verändernden Umfängen während der Therapie. Durch die einfache Handhabung können Patientinnen und Patienten, die MAK nach entsprechender Einweisung durch das Fachpersonal selbst anlegen, ablegen und die

Klettverschlüsse während des Tragens eigenständig nachjustieren, sodass die Kompressionswirkung bei fortschreitender Entstauung optimal aufrechterhalten werden kann². Offene Wunden im Versorgungsbereich müssen zunächst mit einem Wundverband abgedeckt werden, bevor das Kompressionssystem angelegt wird. Das Tragen eines Unterziehstrumpfs (z.B. Juzo Liner) ist bei den Segmenten der unteren Extremität grundsätzlich empfehlenswert. Alternativ bietet die Kombination mit Juzo SoftCompress Bandagehilfen eine ideale Versorgungsmöglichkeit, die den Therapieerfolg zusätzlich begünstigt.

Juzo ACS Light

Durch seine kurzzügigen Eigenschaften werden mit dem Juzo ACS Light ein niedriger Ruhedruck und ein hoher Arbeitsdruck erzielt. Die einzelnen Segmente sind durch das eingearbeitete Inlett (Fixierhilfe) leicht anzulegen und miteinander kombinierbar. Durch die Haftbänder am oberen Ende eines Segmentes wird zu jeder Zeit ein guter Halt gewährleistet. Nicht zuletzt erhöht das angenehme Material die Therapietreue und unterstützt die Patientinnen und Patienten bei dem Selbstmanagement.

Juzo Compression Wrap

Dank ihrer außerordentlich kurzzügigen Eigenschaften verfügen die Juzo Compression Wrap Produkte über einen sehr hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck. Durch die doppelseitigen Klettverschlüsse und die hilfreichen Griffzonen sind sie leicht anzulegen und können ideal an schwankende Körperumfänge angepasst werden. Die speziellen Einkerbungen an den Laschen ermöglichen einen lückenlosen Verschluss, sodass der Entstehung von Fensterödemen vorgebeugt wird. Das Besondere: Die Farbe kann individuell nach Patientenwunsch von Beige auf Schwarz gewendet werden.

Eigenschaften:

- Variabler Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- Hoher Arbeitsdruck
- Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- Perfekter Halt durch innen liegende Haftbänder
- Einfach anzuziehen dank der eingearbeiteten Fixierhilfe
- Desinfektion und Aufbereitung möglich¹

Eigenschaften:

- Variabler Kompressionsdruck bis zu 60 mmHg
- Sehr hoher Arbeitsdruck
- Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- Spezielle Einkerbungen sorgen für eine optimale Überlappung der Laschen und beugen so der Entstehung von Fensterödemen vor.
- Patentierte Griffzonen am oberen und unteren Ende erleichtern das Anlegen
- Farbe kann individuell von Beige auf Schwarz gewendet werden.

Farben:



Farbe:



¹ Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.

² Mosti, G. & Partsch, H.: Druckmessungen unter Klettverschluss-Kompression. Vasomed 2017; 29(5) 212-216.

Juzo ACS Light



Oberschenkelsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.0008
- Inklusive lose Extender zur Verlängerung
- Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- Jeweils für links und rechts erhältlich



Kniesegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.1003
- Komfortable Aussparungen an Patella und Kniekehle
- Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- Links und rechts tragbar



Unterschenkelsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.2010
- Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- Jeweils für links und rechts erhältlich



Fußsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.3008
- Links und rechts tragbar
- Mit eingearbeiteten Malleo-Pelotten
- Inklusive lose Extender zur Druckverstärkung

Jetzt mit
Hilfsmittel-
nummer!



Für die obere Extremität ist Juzo ACS Light als Arm- und Handsegment erhältlich.

Juzo Compression Wrap



Oberschenkelsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.0007
- Links und rechts tragbar



Kniesegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.1002
- Links und rechts tragbar



Unterschenkelsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.2009
- Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- Links und rechts tragbar
- Inklusive Unterziehstrumpf



Fußsegment

- Hilfsmittelnummer: 17.06.23.3009
- Links und rechts tragbar

Jetzt mit
Hilfsmittel-
nummer!



Für die obere Extremität ist Juzo Compression Wrap als Arm- und Handsegment erhältlich.

Rezeptbeispiel bei Indikation „Lymphödem“

Gebühr Geb. pfl. noctu Sonstige Unfall Arbeits Unfall	Krankenkasse bzw. Kostenträger			BVG	Hilfs- mittel	Imf- stoff	Spr.-St. Besarf	Begr- Pflcht	Apotheken-Nummer / IK	
	Name, Vorname des Versicherten			6	7	8	9			
	geb. am			Zuzahlung		Gesamt-Euro				
	Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status			Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe		
Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum			1. Verordnung							
			2. Verordnung							
			3. Verordnung							
									Vertragsarztstempel	
<p>Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)</p> <p>1 Medizinisches adaptives Kompressionsbeinsystem bestehend aus: Oberschenkelement, Knieelement, Wadenelement und Fußelement</p> <p>Diagnose / Indikationen: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase bei Lymphödem Stadium II, linkes Bein</p>										
<p>Bei Arbeitsunfall auszufüllen:</p> <p>Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer</p>			Abgabedatum in der Apotheke						Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)	

Rezeptbeispiel bei Indikation „venöses Ödem“

Gebühr Geb. pfl. noctu Sonstige Unfall Arbeits Unfall	Krankenkasse bzw. Kostenträger			BVG	Hilfs- mittel	Imf- stoff	Spr.-St. Besarf	Begr- Pflcht	Apotheken-Nummer / IK	
	Name, Vorname des Versicherten			6	7	8	9			
	geb. am			Zuzahlung		Gesamt-Euro				
	Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status			Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe		
Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum			1. Verordnung							
			2. Verordnung							
			3. Verordnung							
									Vertragsarztstempel	
<p>Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)</p> <p>1 Medizinisches adaptives Kompressionsbeinsystem bestehend aus: Wadenelement und Fußelement</p> <p>Diagnose / Indikationen: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase bei venösem Ödem rechts</p>										
<p>Bei Arbeitsunfall auszufüllen:</p> <p>Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer</p>			Abgabedatum in der Apotheke						Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)	



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstr. 3
93073 Neutraubling
Germany

Telefon: 0 94 01/92 260
E-Mail: info@compressana.de

Über unseren **Online Shop**
können Sie Ihre Bestellung
rund um die Uhr tätigen:
portal.compressana.de



Apotheken erhalten die Entstauungssysteme, SoftCompress Bandagenhilfen und medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) über die COMPRESSANA GmbH.

www.entstauungssysteme.de

COMPRESSANA ist Mitglied der Juzo Gruppe.

Es gelten die allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der COMPRESSANA GmbH.